

Медицинское изделие «Многофункциональный раствор с гиалуронатом натрия для ухода за мягкими контактными линзами Hidro Health HA»

Регистрационное удостоверение РЗН 2021/14398 от 27 мая 2021 года

Производитель:

ДИСОП, С.А. (DISOP, S.A.), Авенида, Вальделапারা,
31-А, Е-28108, Алькобендас, Мадрид, Испания,
тел.: +34 916 612 244

По всем вопросам следует обращаться к уполномоченному представителю
производителя ООО «НОВАЛЕКС»:

109028, г. Москва, пер. Ивановский М., дом 7-9, строение 1, Эт. 1 Помещение V, Ком. 10
Тел. 8 (495) 419-17-87
www.novalexgroup.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. Использование возможно после консультации с врачом-офтальмологом и изучения инструкции по применению.
Не принимайте решения медицинского характера без предварительной консультации с медицинским работником.
Конструктивные особенности раствора предусматривают его использование в домашних или аналогичных условиях непрофессионалом, поскольку выполнение назначения раствора не требует особых навыков и профессионального оборудования.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для очистки, промывания, увлажнения, дезинфекции, смачивания и хранения мягких контактных линз.
Предназначен для индивидуального использования с соблюдением инструкции по применению и мер предосторожности.

ОПИСАНИЕ

Многофункциональный раствор с гиалуронатом натрия для ухода за мягкими контактными линзами Hidro Health HA, представляющий собой соляной раствор с нейтральным рН для обеспечения контакта с глазом.

Формула включает дезинфицирующие и моющие средства, а также увлажнители, подходящие для полного ухода за линзами и не требующие использования других компонентов.

При использовании Многофункционального раствора с гиалуронатом натрия для ухода за мягкими контактными линзами Hidro Health HA Ваши линзы остаются чистыми и комфортными, поскольку в его состав входят чистящие и увлажняющие средства.

Если Вы оставите Ваши линзы в контейнере на ночь, Hidro Health HA эффективно устранил протеиновые отложения, накопившиеся на контактной линзе.

Этот раствор можно использовать с любым типом мягких контактных линз, включая силикон-гидрогелевые.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Раствор показан к применению для очистки, промывания, увлажнения, дезинфекции, смачивания и хранения мягких контактных линз.
Предназначен для индивидуального использования с соблюдением инструкции по применению и мер предосторожности и в соответствии с рекомендациями Вашего офтальмолога.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость компонентов раствора.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Аллергические реакции на компоненты раствора. При возникновении побочных эффектов проконсультируйтесь с медицинским работником.
Медицинское изделие является стерильным. Стерилизовано с использованием методов асептической обработки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Всегда используйте свежий многофункциональный раствор. Вылейте раствор, оставшийся в контейнере для контактных линз с предыдущего дня.
- Держите бутылку плотно закрытой, при эксплуатации избегайте контакта пипетки с любой поверхностью.
- Убедитесь, что контрольное кольцо не сломано перед использованием продукта в первый раз. После вскрытия использовать в течение 90 суток.
- Храните раствор в недоступном для детей месте.
- Не используйте продукт, если у Вас аллергия на любой из его компонентов.
- В случае ощущения постоянного дискомфорта или раздражения, снимите линзы, прекратите использование раствора и обратитесь к специалисту по коррекции зрения.
- Линзы могут храниться в закрытом контейнере для контактных линз до 30 дней.
- Не пользуйтесь раствором с истекшим сроком годности.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Мойте руки перед работой с линзами и раствором.
2. Снимите одну из контактных линз и ополосните ее в течение нескольких секунд.
3. Добавьте три или четыре капли многофункционального раствора на линзу и очистите ее, протирая линзу в течение 20 секунд.
4. Налейте достаточно раствора в контейнер для контактных линз, чтобы линза была полностью покрыта жидкостью, а затем положите в него линзу.
5. Снимите другую контактную линзу и повторите тот же процесс.
6. Оставьте контактные линзы в закрытом контейнере на ночь или по крайней мере на 6 часов, чтобы достичь надлежащего обеззараживания и удалить белковые и липидные отложения.
7. Перед повторным использованием линзы ополосните ее в течение нескольких секунд раствором.

ХРАНИЕНИЕ

Многофункциональный раствор с гиалуронатом натрия для ухода за мягкими контактными линзами Hidro Health HA должен храниться в отапливаемых помещениях при температуре от + 5°С до + 30°С, относительной влажности до 80 % и атмосферном давлении 700–1060 гПа и должны быть защищены от прямых солнечных лучей.

СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Многофункциональный раствор с гиалуронатом натрия для ухода за мягкими контактными линзами Hidro Health HA, согласно исследованию устойчивости, отвечает требованиям спецификаций в течение 36 месяцев (3 лет).

Срок годности невскрытого МИ: 36 месяцев с даты производства. Вскрытый флакон с раствором использовать в течение 3 месяцев.
Не использовать по истечении 3 месяцев после вскрытия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные обязательства производителя распространяются на медицинское изделие до истечения срока годности, указанного на упаковке, при условии сохранения целостности упаковки и соблюдении условий транспортирования и хранения.

ЭКСПЛИКАЦИЯ СИМВОЛОВ, НАНЕСЕННЫХ НА ПЕРВИЧНУЮ УПАКОВКУ

СИМВОЛ				
ЗНАЧЕНИЕ	Знак лицензии переработки отходов упаковки	Номер лота МИ	Годен до	Европейский знак соответствия 0318
СИМВОЛ				
ЗНАЧЕНИЕ	Не допускать воздействие солнечного света	Стерилизация с применением методов асептической обработки	Производитель	Температурный диапазон
СИМВОЛ				
ЗНАЧЕНИЕ		Обратитесь к инструкции по применению	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению	